



## TANTU APHTHAE - JEL

8 ml

Ağızdaki aftlar ve küçük yaralar.

Ağrıyı hafifletir.

Hızlı iyileşme sağlar.

**6 saate kadar uzun süren etki.**

### Endikasyonlar

TANTU APHTHAE, ağızdaki aftların, aftlı ülserlerin, ortodontik aparatlar, sabit veya hareketli protezlerle temas sebebiyle oluşan küçük yaraların tedavisinde kullanılan bir tıbbi cihazdır. Jel formu, doz ölçülü ağız sayesinde, özellikle bölgesel ve gözle görülebilen aftların sebep olduğu yaralar için uygundur. Ağız boşluğundaki yaraları yabancı cisimlerle temastan koruyan "bariyer etkili" bir koruyucu tabaka oluşturarak ağrıyı hızlı bir şekilde azaltır

ve daha fazla tahriş riskini önler.

Aftların, aftlı ülserlerin ve yaraların üzerini kaplayarak, dış etkenlerle, kimyasal, mekanik ve termal uyarıcılarla teması kısıtlar ve aftların iyileşme sürecini hızlandırır.

İşlevsel bileşenleri sayesinde yaraların kabuk bağlamasını sağlar ve iyileşme sürecini hızlandırır.

Yanmayı azaltır.

Yetişkinler, 6 yaş ve üzeri çocuklar için uygundur.

Alkol içermez. Yanma yapmaz.

### Bileşimi

Demirhindi'nin titre ve standardize edilmiş ekstresi  
Xyloglucan  
Centella asiatica glikozitleri,  
Aloe vera polisakkaritleri,  
Bitkisel gliserin, Pantenol, Su,  
Maltodekstrin, Polivinilpirolidon,  
Karboksimetilselüloz, Nane esansı yağı, Etoksillenmiş hidrojene hint yağı, Sitrik asit,  
Potasyum sorbat, Sodyum benzoat, Sodyum EDTA, hidroksipropil metilselüloz, Sukraloz.

### Dozaj ve kullanım talimatları

Aplikatör ile direkt temastan

BRAILLE TEXT				COLOUR 1
MOCKUP				COLOUR 2
<b>Leaflet_TV SOS AFTE GEL 8 ml</b>				COLOUR 3
MOCKUP	PAM VERSION N.07	DIMENSION	FRONT/BACK	COLOUR 4
<b>MKPS36161</b>				COLOUR 5
DATE 14/10/2020				COLOUR 6
This design is 'property' of a.c.i. angelini francesco s.p.a. and must not be delivered or exhibition to another person in original or in copy.				
PRODUCT ARTWORK MANAGEMENT APPROVAL	MARKETING APPROVAL	MARKETING APPROVAL	MARKETING APPROVAL	MARKETING APPROVAL
	RA APPROVAL	RA APPROVAL	RA APPROVAL	RA APPROVAL
	ONAYLANDI Tarih: 15.06.24.3.21			

mark "/" the box, if approval by the responsible body is not foreseen

kaçınarak, tüm yarayı kaplayacak şekilde bir ya da iki damla jel uygulayınız. Eğer yara zor ulaşılabilen bir yerdeyse, jeli temiz parmağınız veya bir gazlı bez yardımıyla uygulayınız. Ürünün koruyucu tabaka oluşturabilmesi ve yaranın üzerinde olabildiğince uzun süre kalabilmesi için dilinizle en az iki dakika dokunmayınız. Günde 3-4 defa veya ihtiyaca göre daha fazla uygulayınız. Sürekli olarak 30 günden daha fazla kullanmayınız. Ürünü daha etkili hale getirmek için, uyguladıktan sonra en az bir saat yiyecek ve içecek tüketmeyiniz.

#### Uyarılar

- Bileşenlerden birine hassasiyetiniz veya alerjiniz varsa kullanmayınız.
- Her kullanımdan sonra kapağını kapatınız.
- Ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra kullanmayınız.

- Çocukların erişemeyeceği yerde saklayınız.
- Ambalajı hasar görmüş ürünleri kullanmayınız.

Son kullanma tarihi, ambalajı açılmamış ve uygun şekilde saklanan ürün için geçerlidir. Işıktan koruyarak, serin ve kuru bir yerde oda sıcaklığında orijinal ambalajında saklayınız.

#### TANTU APHTHAE'in

mevcut formları:

- **GARGARA:** 120 ml'lik şişe
- **SPREY:** 20 ml'lik şişe
- **JEL:** 8 ml'lik tüp

Revizyon: Aralık 2019

Üretici:

A.C.R.A.F. S.p.A. Viale Amelia,  
70 - 00181 ROMA - İTALYA

İthalatçı:

Angelini İlaç San. ve Tic. A.Ş.  
Levent, Beşiktaş/ İSTANBUL

CE 0477

  
ANGELINI